


INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU DO BADAŃ GENETYCZNYCH PTAKÓW: BADANIE MARKERÓW

1



Zdezynfekuj palec ptaka, w którym wykonasz nakłucie.

2

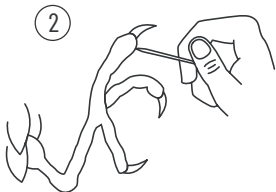

Nakłuj ostrożnie palec ptaka jałową igłą lub lekko przetnij skalpelem.

3



Powstałe krople krwi **nanieś na bibułę filtracyjną** (maksymalnie 3 krople).

4




Ponownie **zdezynfekuj** palec ptaka.

5




Bibułkę nasączoną krwią pozostaw **10-15 minut** do wyschnięcia, a następnie umieść w woreczku strunowym.

6

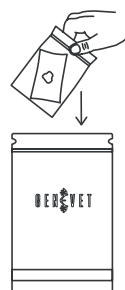

Woreczek z bibułą należy umieścić w logowanym opakowaniu transportowym, po czym szczelnie je zamknąć.

7

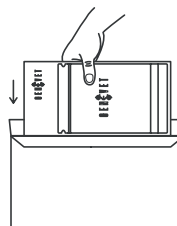

Wypełnić przesłane **skierowanie**, po czym włożyć je do koperty wysyłkowej razem z opakowaniem transportowym. Kopertę wysyłkową **przechowywać w lodówce** do czasu wysłania. Wysyłka powinna odbyć się najszybciej jak to możliwe (maksymalnie do 3 dni od pobrania).

Materiał można także dostarczyć osobiście do recepcji na **I piętrze budynku przy ul. Kampinoskiej 25** w Gdańsku.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 536 806 857 lub 503 039 333