



INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU DO BADAŃ GENETYCZNYCH PTAKÓW: BADANIE MARKERÓW



1 **Zdezynfekuj** palec ptaka, w którym wykonasz nakłucie.

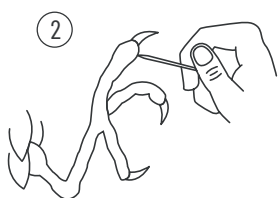


2 **Nakłuj** ostrożnie palec ptaka jałową igłą lub lekko przetnij skalpelem.

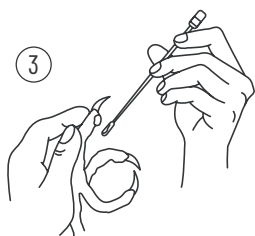


3 Powstałe krople krwi **nanieś na wymazówkę** (maksymalnie 3 krople).




4 Ponownie **zdezynfekuj** palec ptaka.

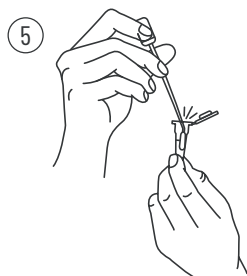


5 Pobrany materiał należy niezwłocznie umieścić w dołączonej do zestawu, małej probówce z płynem (buforem transportowym). Wymazówkę należy **przełamać w wyznaczonym miejscu** u dołu patyczka. Odłamana końcówka wymazówki musi być **całkowicie zanurzona w płynie**.

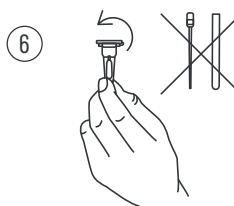

6 Małą probówkę z pobranym wymazem należy **szczelnie zamknąć**. Patyczek oraz plastikowy pojemnik na wymazówkę wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

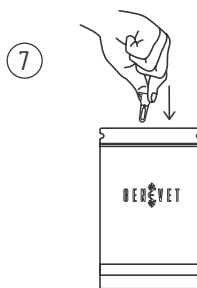

7 Małą probówkę z pobranym wymazem należy umieścić w logowanym opakowaniu transportowym, po czym szczelnie je zamknąć.

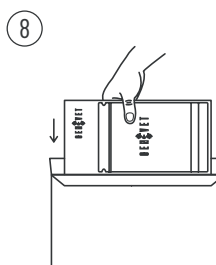

8 Wypełnić przesłane **skierowanie**, po czym włożyć je do koperty wysyłkowej razem z opakowaniem transportowym. Kopertę wysyłkową **przechowywać w lodówce** do czasu wysłania. Wysyłka powinna odbyć się najszybciej jak to możliwe (maksymalnie do 3 dni od pobrania).

Materiał można także dostarczyć osobiście do recepcji na **I piętrze budynku przy ul. Kampinowskiej 25** w Gdańsku.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 536 806 857 lub 503 039 333