

INSTRUKCJA POBIERANIA SIERŚCI DO BADAŃ DNA



Materiał do badania stanowią cebulki włosów.

W przypadku pobierania próbek od więcej niż jednego psa, aby zapobiec zanieczyszczeniu próbki innym materiałem biologicznym (kontaminacji) należy każdorazowo umyć ręce lub zmienić rękawiczki przed rozpoczęciem procedury pobierania od kolejnego zwierzęcia.

Jak pobrać cebulki włosów do badań genetycznych?

- Przed przystąpieniem do pobierania materiału należy wyczesać zwierzę, by usunąć powierzchniowe zanieczyszczenia i wypadniętą już sierść.
- Przy użyciu pęsety, złapać kosmyk sierści i energicznie pociągnąć. **Na końcach pobranej sierści muszą znajdować się cebulki włosowe.** Czynność powtórzyć 2-3 razy.
- Pobraną sierść ułożyć tak, by cebulki włosowe znajdowały się po jednej stronie i związać ją w kosmyk.
- Umieścić kosmyk w odpowiedniej kopercie dołączonej do zestawu pobraniowego.
- Opisać kopertę danymi zwierzęcia, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację próby ze zwierzęciem i dołączonym skierowaniem na badanie genetyczne.
- Próbę wraz ze skierowaniem umieścić w kopercie zwrotnej.
- Kopertę z pobraną sierścią **przechowywać w temperaturze pokojowej** do czasu wysłania. Wysłać najszybciej jak to możliwe (**maksymalnie do 14 dni od pobrania**).